

OXÍMETRO DE PULSO – MOD. LK87 – AIQUE



El pulsioxímetro de dedo LK87 es un dispositivo portátil que se coloca en la punta del dedo para medir la saturación del oxígeno en la sangre (SpO2) y el pulso.

- La saturación del oxígeno indica la cantidad de oxígeno transportado por los glóbulos rojos a través del cuerpo.
- El pulsioxímetro LK87 estima la cantidad de oxígeno en sangre sin necesidad de extraer una muestra de sangre, lo que lo convierte en un método indoloro y no invasivo.

Instrucciones de Uso

1. Previo a la medición: Relájese y permanezca quieto durante unos minutos antes de colocarse el pulsioxímetro.
2. Colocación: Inserte el dedo índice o medio dentro del pulsioxímetro, asegurándose de que quede bien ajustado.
3. Lectura: Mantenga el pulsioxímetro en su dedo durante al menos un minuto hasta que la lectura se estabilice.
4. Registro: Tome nota de la lectura más alta que aparece en la pantalla después de 5 segundos de estabilización.

Beneficios

- Pantalla TFT de dos colores fácil de leer.
- Especialmente útil para personas con: insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial.
- Adecuado para la práctica de deportes a gran altitud (por ejemplo, montañismo, esquí y deportes de aviación).
- Indicador de batería baja.
- Incluye correa de sujeción.

Precauciones

- No utilice el pulsioxímetro en entornos con gases inflamables.
- Evite usar el pulsioxímetro mientras se somete a una resonancia magnética (MRI) o una tomografía computarizada (CT).

El pulsioxímetro de dedo LK87 es un dispositivo médico y no debe usarse como base para un diagnóstico médico. Si tiene alguna inquietud sobre su salud, consulte a un médico.

Ideal para chequear la SpO2 fuera del hospital. Se puede usar en casa, consultorios, clínicas, al aire libre, campos deportivos, etc.

Especificaciones

- Inspección fotoeléctrica oxihemoglobina
- Fácil manejo e interpretación
- Medición de SpO2 durante movimiento leve
- Forma de onda sincrónica, marca el latido cardiaco y pitido de pulso
- Pantalla LED dual con PR, SpO2 y gráfico de barra
- Rango de 0 – 100%
- Resolución: 1%
- Exactitud: 70 – 100% $\pm 2\%$
- Rango de pulso: 30 – 250 BPM $\pm 2\%$
- Durabilidad y fiabilidad confiable
- Operación simple y chequeo en tiempo real
- Indicador de batería baja
- Apagado automático 8 seg.
- Peso: 50 gr. aprox
- Medidas: 6cm x 3,5cm x 3cm
- Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)
- Marca: Aique
- Origen: China



Medición en un toque



2 pilas AAA



Pantalla OLED



Portátil



Apagado automático



Lectura exacta



Bajo consumo de batería

