

SELLADORA – MOD. SEAL 120 – RUNYES



- Operación simple y segura.
- Con soporte para rollos.
- Fácil cambio de sistema de corte de las mangas.
- Solo 3 minutos de pre-calentado para su uso.
- Mantiene la temperatura constante, rango 200°C ± 10°C.
- Ancho máximo de papel 30 cm. (manga 300mm.)
- Ancho de sellado de 12 mm.
- Procedencia: China.

Especificaciones Técnicas

- Voltaje: 220 volt, 50-60Hz
- Potencia: 100 Watt
- Peso neto: 4.8 Kg.
- Dimensiones: Ancho: 50 cm.
Profundidad: 40 cm.
Altura: 21 cm.



OPERACIÓN

1. ANTES DE SELLAR ASEGÚRESE QUE EL LADO CON PAPEL DE LA MANGA SE ENCUENTRE HACIA ABAJO.
2. Al encender el equipo, la luz verde comenzará a parpadear. Demorara aproximadamente 3 minutos en precalentar.
3. Cuando la luz verde deje de parpadear, escuchará un pitido. Eso indica que la selladora está lista para trabajar.
4. Mantenga la palanca abajo 3 segundos, cuando la luz amarilla se prenda y escuche un pitido, significa que el sellado está listo.




ES IMPORTANTE QUE EL MOVIMIENTO DE LA MANILLA SEA EN LA DIRECCIÓN QUE SE INDICA (HACIA ATRÁS).

FALLAS POR PROBLEMAS DE USO, NO ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

5. En caso de mantener la palanca abajo más de 6 segundos se activará la alarma.
6. Si la palanca se mantiene abajo 30 segundos se desactivará la selladora.

Soporte para rollos

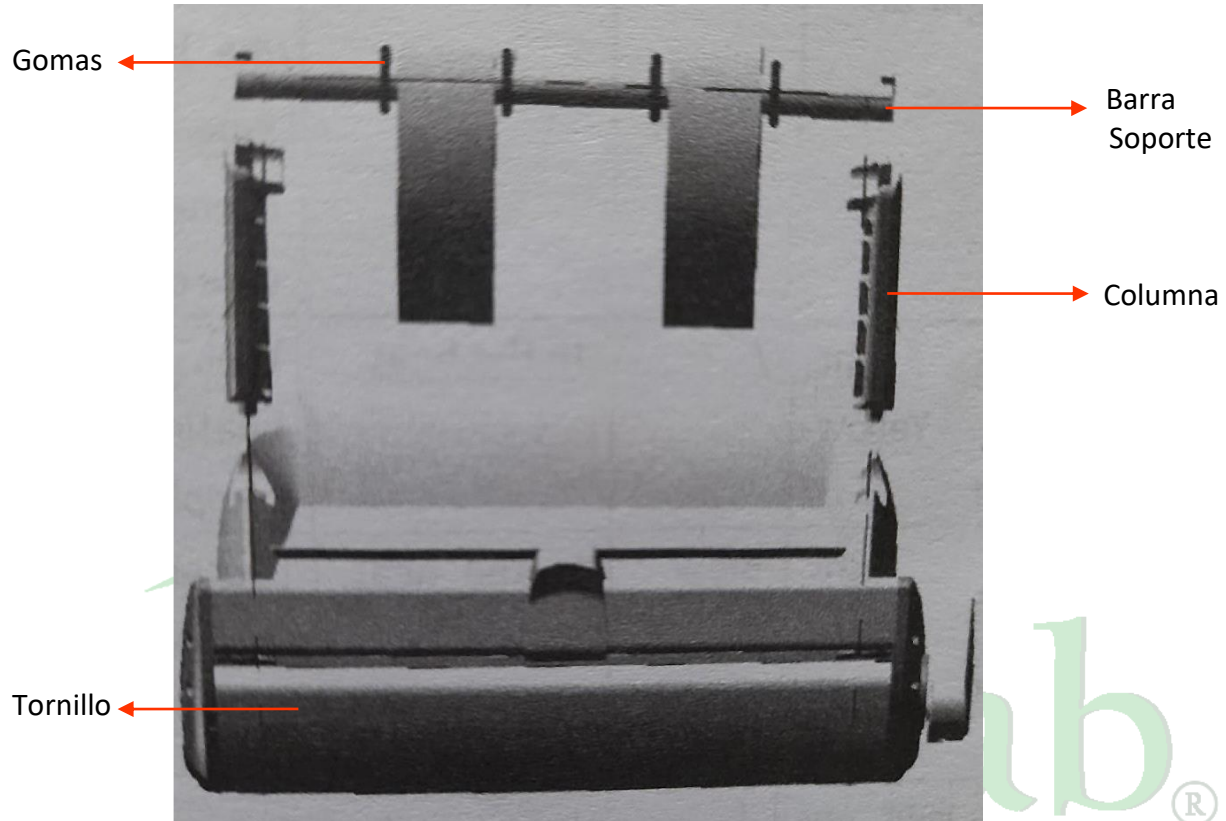

1. Inserte las columnas en los espacios laterales de la selladora.
2. Fije las columnas con los tornillos. **La fijación es por debajo de la selladora.**
3. Ponga el o los rollos en la barra de soporte. Si son dos rollos puede fijarlos con las gomas. Si es un rollo ocupe las fijaciones plásticas.
4. Luego ponga la barra sobre las columnas.

Limpieza

Limpie la selladora con paños suaves. Asegúrese de que el equipo esté **frío** antes de limpiar.

IMPORTANTE

1. No presione la palanca en exceso. El sellado no será mejor y se pueden producir daños. La garantía **NO** cubre daños en el equipo por fuerza excesiva al sellar.
2. Desenchufe la selladora al finalizar la jornada.

Contenido

- 1 Cable eléctrico
- 1 (metro) Manga esterilizadora (muestra)
- 1 Cuchillo
- 2 Columnas de soporte
- 1 Barra
- 4 Anillos de goma
- 2 Tornillos fijación columnas
- 2 Fijaciones plásticas para rollo
- 1 Manual de uso



IndusLab[®]