


**MANTA TÉRMICA DE RESCATE  
SABANILLA ALUMINIZADA**

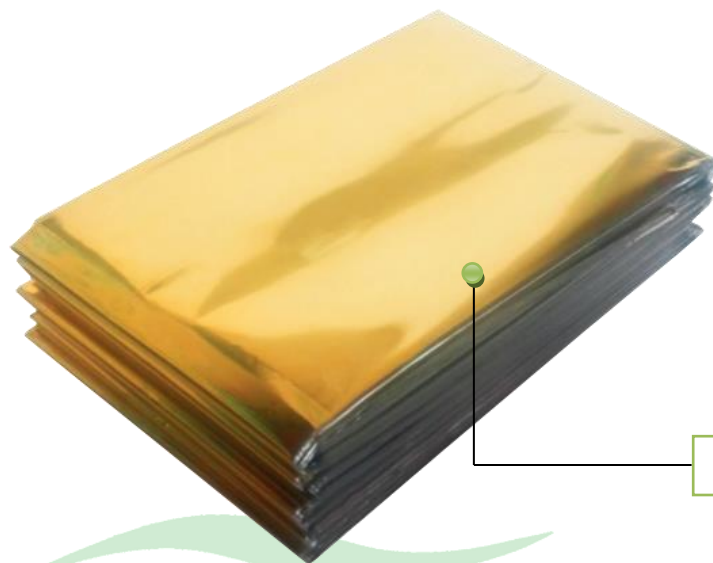

Bajar o Subir temperatura

Las Mantas o Sabanillas Aluminizadas tienen la finalidad de ser aislantes térmicos para un persona o paciente que necesita protección o regulación de su temperatura corporal.

Su función es no dejar escapar el calor generado por el cuerpo humano, previniendo estados hipotérmicos, también cumple con la función inversa de repeler la luz directa del sol para evitar la deshidratación e insolación en climas extremos.

Se recomienda siempre incorporarlas en un botiquín, fijarla con adhesivo o similar si se va a envolver a un herido y en caso de estar en la nieve poner ropa debajo para que la manta no pierda el calor.

- Dimensión: 1.6 x 2.1 mt.
- Peso: 0.4 Kg. aprox.
- Color silver y gold.



**PARA ENTRAR EN CALOR**

Hipotermia  
Accidentes  
Esperando un rescate  
Situaciones de frío

La parte plateada hacia la persona para retener el calor corporal.

Se debe tapar la cabeza, es por donde se pierde mas calor.

La parte dorada hacia afuera para que el color absorba el calor del sol.

**Para bajar la temperatura**

Fiebre  
Golpe de calor  
Protegerse del calor

La dorada hacia la persona para que retenga el calor.

La parte plateada hacia el exterior para que refleje el calor del sol.

**IndusLab**<sup>®</sup>